


WENDE-MUNDSCHUTZ MIT SEITLICHEM EINSCHUB (UND VERSTELLBAREN OHRSCHLAUFEN/BÄNDERN/FESTEN OHRSCHLAUFEN)

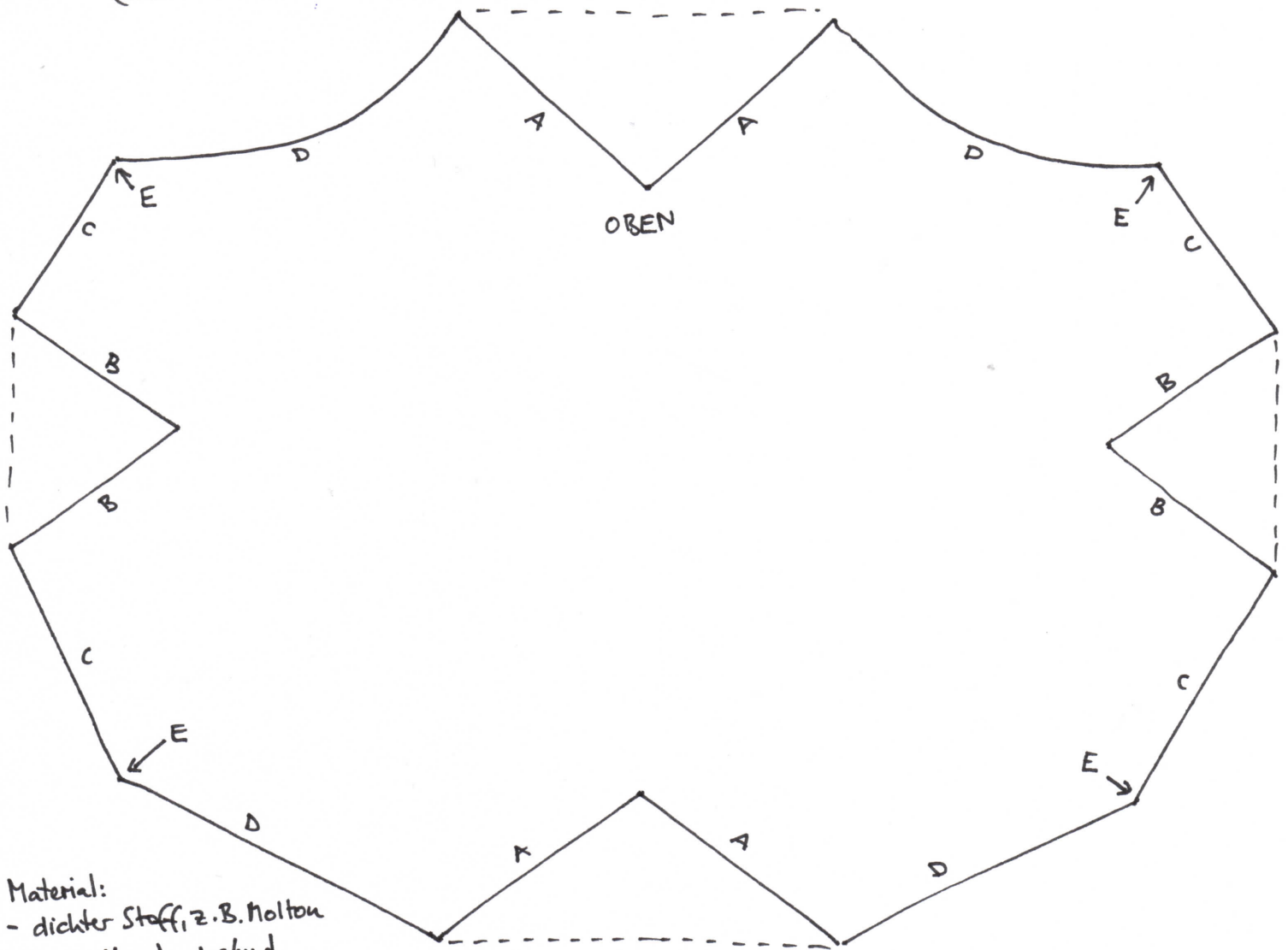


Material:

- dichter Stoff, z.B. Molton
- Gummiband oder/und Schrägband / Schnürsenkel o.ä.

1. Schablone ausschneiden, 2x Aufmalen, entlang der (gestrichelten!) Linien ausschneiden
2. Auf beiden Stoffseiten je auf links A und B zusammen nähen, überstehenden Stoff ausschneiden
3. C vernähen, so dass der Stoff nicht ausfranst, z.B. mit Zickzack-Stich. Wenn man die Seiten umgeklappt annähen möchte, auf dem Stoffausschnitt noch etwas Nahtzugabe einplanen
4. Beide Teile links auf links zusammen legen

Variante verstellbare Ohrschlaufen

5a. Oben bei E jeweils ein ca. 15cm langes Gummiband einlegen, am Ende eine Schlaufe nähen 

Variante Bindebänder

5b. Oben bei E jeweils ein ca. 30cm langes festes Band einlegen

Variante feste Ohrschlaufen

5c. Oben bei E jeweils ein ca. 15cm langes Gummiband einlegen

— oben entlang von D zusammen nähen, Kanten vernähen —

6a. unten bei E jeweils ein ca. 10cm langes festes Band einlegen (das kann an der Gummischlaufe individuell angeknüpft werden)

6b. unten bei E ein ca. 30cm langes festes Band einlegen (die Bänder werden am Hinterkopf verknüpft)

6c. Ende der Gummibänder unten an E stecken, ausprobieren, nachjustieren

— unten entlang von D zusammen nähen, Kanten vernähen —

FERTIG!